

Bedienungs- anleitung Akku/Bedienteil

MM Store GmbH
Fasanenweg 3
D-93087 Alteglofsheim
Telefon: +49(0)941 59937-226
eMail: info@mc-heat.com



Bedienteil / Akku aufladen

Akku an Ladekabel anschließen und mit Stecker verbinden.

Im leeren Zustand beginnt nun das unterste blaue Lämpchen zu blinken.

Überschreitet der Ladezustand 25% blinken die unteren beiden Lämpchen, bei 50% die unteren 3 Lämpchen..

Der Akku ist voll, wenn alle 4 blauen Lämpchen leuchten und keines mehr blinkt.

Akku vom Ladekabel nehmen und in die Bandage stecken.



1

Kabel



2



3



4

Akku in die Bandage einfügen


1. Akku in die dafür vorgesehene Tasche stecken
2. Akku mit dem Kabel dort verbinden
3. Akku ganz in der Tasche verstauen
4. Akku anschalten

Prüfung des Ladezustandes:

Akku ist **nicht an der Bandage**
angeschlossen:

Schwarzen Power-Knopf drücken
Anzeige des Ladezustandes des Akkus

4 blaue Lämpchen	= 100%,
3 blaue Lämpchen	= 75%
2 blaue Lämpchen	= 50%
1 blaue Lämpchen	= 25%

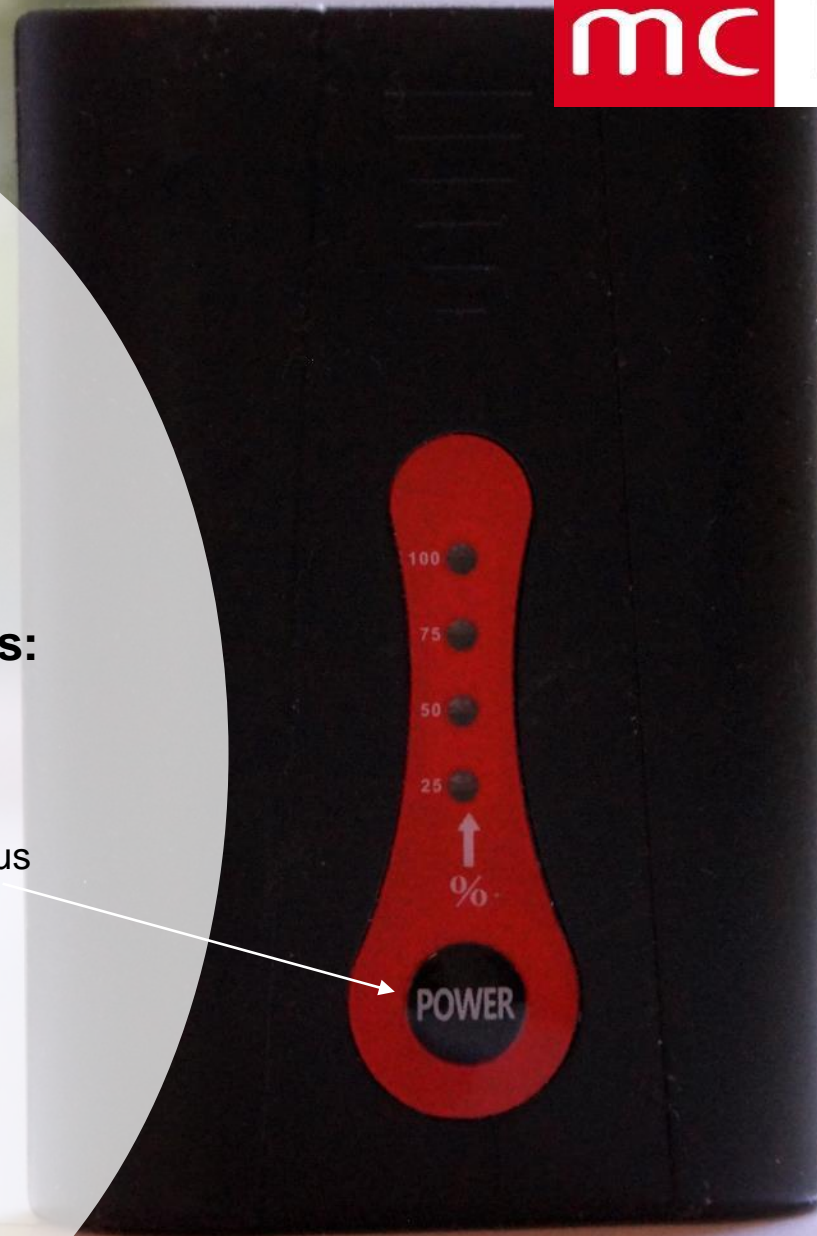

„Power“
drücken



zeigt Ladezustand

Springt um auf
Heizstufenanzeige

Weiter auf
„Power“
bleiben



Stufe 4 =
höchste



kurz
loslassen -
jeweils
erneutes
drücken
=
Einstellung
der
Heizstufe



Stufe 1 =
niedrigste

Springt zurück in
Ladezustandsanzeige



Loslassen

zeigt Ladezustand

zeigt Heizstufe



Ladezustand und Heizstufen einstellen

Akku ist mit Bandage verbunden:
Schwarzen Power-Knopf drücken und
gedrückt halten =

- zeigt kurz Ladezustand an:
bei 100% = 4 Lämpchen.... (75% = 3
Lämpchen...)
- Bei weiterem gedrückt halten **springt
die Anzeige um, es leuchtet dann
das ober Lämpchen** Wir sind nun
im Heizstufenmodus.
Hier können die **einzelnen
Heizstufen** durch **einfaches
drücken** von Stufe 4 = höchste Stufe
(oberes Lämpchen) bis 1, niedrigste
Stufe (unterstes Lämpchen)
runtergeregelt werden.
- Ist die Heizstufe eingestellt, **springt
der Akku zurück auf die Anzeige
des Ladezustandes.**